

# 儀器操作報告

儀器: 身體組成

指導老師 吳志銘

指導學長 夏文賢  
杜啟銘

組長 吳美玲 49914143

組員 王惠敏 49914151

劉建呈 49914131

陳思妤 49914119

廖主惠 49914154

陳聖凱 49914136

郭智堯 49914146



1. 開啟電源。  
(開機後會聽到開機音樂聲)  
持續 1~2 分鐘熱機



1. 確定右上角的水平儀器泡維持在中間。
2. 若不再中間則須調整下面四個支撐的角。



1. 開機後的畫面



1. 確認機器是否有紙



1. 確定雙腳腳掌及腳跟確實踏在感應片上。
2. 保持穩定，不說話。



1. 開始測量體重。



1. 輸入身高。
2. 按” 下一個” 。

補年齡相片

1. 輸入年齡。
2. 按” 下一個” 。



1. 選擇性別。
2. 按”下一個”。



雙手握緊手把向前推至手打直。  
(勿將手把向下壓)



1. 維持姿勢平穩、不說話。
2. 直到螢幕上顯示測量完成。




1. 螢幕顯示出分析結果。
2. 等待數據單列印。  
(若沒印出按左下)





1. 數據單印出

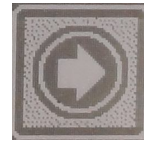


2. 按



1. 按



回到主畫面

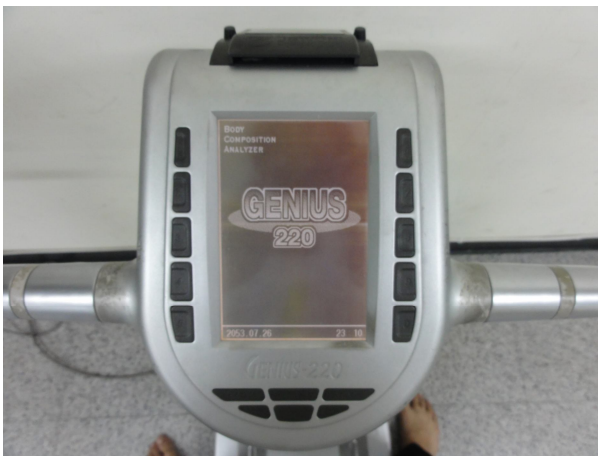

1. 繼續下一位受測者



檢測數據。